

# FERTI · LILY

EEN BEETJE HULP... BIJ HET MAKEN  
VAN EEN KLEIN WONDER

# SAMEN ZWANGER WORDEN, HEEFT SOMS EEN DUWTJE IN DE RUG NODIG



FERTI·LILY



20-30% kans op zwangerschap  
tijdens de meest vruchtbare  
periode (22 jaar)



**32%**

gemiddelde afname in actieve  
spermacellen voor een man na het  
passeren van de 30-jarige leeftijd



**50%**

afname van kans op  
zwangerschap tussen  
22 en 35 jaar



1 op de 3 koppels heeft  
moeite met zwanger worden:  
90 000 000 in totaal

# ONDERSTEUNING VOOR VRUCHTBAARHEID



FERTI·LILY

## KOPPELS VOLGEN EEN LANGE EN FRUSTRERENDE WEG VOORDAT ZE HULP KRIJGEN

- 🌸 12-24 maanden alvorens doorverwijzing naar specialist
- 🌸 enkel ingrijpende opties zoals IUI en IVF
- 🌸 zeer weinig tot geen ondersteuning

## ZEER BEPERKTE OTC-OPTIES

- 🌸 naast ovulatietesten en zwangerschapstesten weinig ondersteunend materiaal beschikbaar bij de apotheek
- 🌸 ovulatietesten hebben geen directe invloed op de zwangerschap
- 🌸 aanpassing in levensstijl, bijhouden van de cyclus en met de benen in de lucht liggen, momenteel de enige niet medische opties

# ONZE OPLOSSING



FERTI·LILY



PP  
€34,95

CNK: 4233-086

**DE FERTI·LILY CONCEPTIECUP:**  
KAN DE KANS OP EEN  
ZWANGERSCHAP VERGROTEN  
ZONDER DE INTIMITEIT IN  
DE WEG TE STAAN


- ☞ hormoonvrij conceptiehulpmiddel
- ☞ kan na het vrijen worden ingebracht
  - ☞ zoveel mogelijk sperma naar de baarmoederhals geleiden
  - ☞ meer zaadcellen kunnen de baarmoeder inzwemmen
- ☞ kan gemakkelijk thuis gebruikt worden




# HOE GEBRUIKEN?




FERTI·LILY

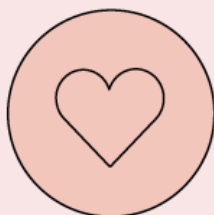


VRIJEN

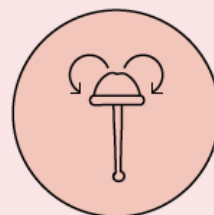


CUP OMVOUWEN

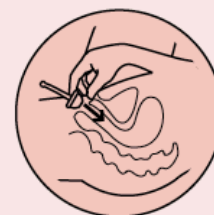

INBRENGEN

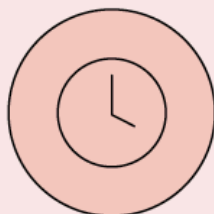

20-60 MIN.

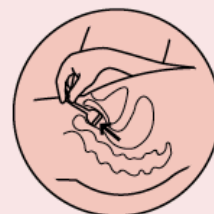

VERWIJDEREN



AFSPOELEN



de cup houdt het sperma op zijn plaats tijdens het plassen, douchen of andere lichaamsbewegingen



gebruik van een conceptiecup kan zorgen voor meer dan 300% verhoging in spermacellen die in de baarmoederhalsslijm zwemmen



de cup kan gewassen en/of uitgekookt worden voor behoud hygiëne

# TESTIMONIALS



FERTI·LILY



Langer dan 1 jaar aan het proberen, na 1 cyclus zwanger. We hadden nog 1 maand om het te proberen zonder hormonen. Dus wilden we alles proberen om het toch natuurlijk te laten verlopen. Het is gelukt om zwanger te worden. Ik geloof dat de FERTI-LILY echt geholpen heeft.



Makkelijk in gebruik, goede uitleg en toeval of niet na 1 cyclus waarbij gebruik is gemaakt van FERTI-LILY: zwanger.



Ik ben er zeer blij mee: het is meteen bij de eerste keer gelukt. Ik heb opgelet met mijn eisprong en heb ovulatietesten gebruikt. Mijn man had trage zaadcellen en we hadden het heel moeilijk om zwanger te worden en met FERTI-LILY is het meteen bij de eerste keer gelukt.



Makkelijk inbrengen en je voelt het niet zitten.



Ik ben totaal verbaasd dat ik deze maand zwanger ben. We proberen al 4 maanden en hebben eerder ook zaadvriendelijk glijmiddel gebruikt. We hebben nu ook FERTI-LILY geïntegreerd in onze routine en ik was meteen zwanger. Ik wil er wel bij zeggen dat het product niet garandeert dat je zwanger wordt, maar het is zeker een mooie manier om het sperma dichterbij de baarmoedermond te krijgen.



Na 7 maanden gewoon proberen schafte ik de cup aan. Na 1x proberen met de cup is het gelukt. Ik ben gelijk zwanger geworden en inmiddels 42 weken onderweg. Het helpt alle zwemmers de goede kant op zodat je na het vrijen nog even kunt knuffelen.



# POS-MATERIAAL & CONDITIES:



FERTI·LILY




SOCIAL MEDIA



PERSCOMMUNICATIE



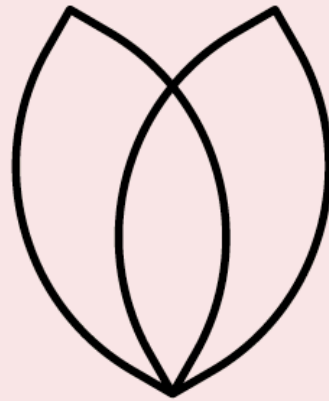

# FERTI · LILY

UN COUP DE POUCE...  
POUR UN PETIT MIRACLE



# UN COUP DE POUCE EST PARFOIS LE BIENVENU QUAND ON SOUHAITE TOMBER ENCEINTE



FERTI·LILY



20 à 30 % de chances de grossesse pendant la période la plus fertile (22 ans)



**32%**

de diminution des spermatozoïdes actifs pour un homme après l'âge de 30 ans en moyenne



**50%**

de chances de grossesse en moins entre 22 et 35 ans



1 couple sur 3 a des difficultés à tomber enceinte: 90 000 000 au total

# AIDE À LA FERTILITÉ



FERTI·LILY

LES COUPLES ONT UN LONG PARCOURS JALONNÉ DE NOMBREUSES FRUSTRATIONS AVANT DE RECEVOIR DE L'AIDE

- 🌸 12-24 mois avant l'orientation vers un spécialiste
- 🌸 Uniquement des options radicales comme l'insémination intra-utérine (IUI) et la fécondation in vitro (IVF)
- 🌸 Très peu ou pas de soutien

## POSSIBILITÉS OTC TRÈS LIMITÉES

- 🌸 Outre les tests d'ovulation et les tests de grossesse, peu de matériel de soutien disponible en pharmacie
- 🌸 Les tests d'ovulation n'ont pas d'influence directe sur la grossesse
- 🌸 Adaptation du mode de vie, suivi du cycle et position couchée les jambes en l'air sont actuellement les seules options non médicales

# NOTRE SOLUTION



FERTI·LILY



PP:  
€34,95

CNK: 4233-086

**LA COUPE DE CONCEPTION:**  
PEUT AUGMENTER LES  
CHANCES DE GROSSESSE  
SANS ENTRAVER L'INTIMITÉ


- ☪ Aide à la conception sans hormones
- ☪ Peut être insérée après les rapports
  - ☪ Apport maximal de spermatozoïdes vers le col de l'utérus
  - ☪ Plus de spermatozoïdes peuvent pénétrer dans l'utérus
- ☪ Peut être facilement utilisée à la maison




# COMMENT L'UTILISER?




FERTI·LILY

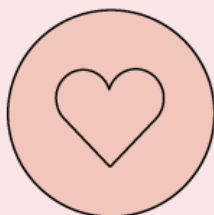


FAITES L'AMOUR

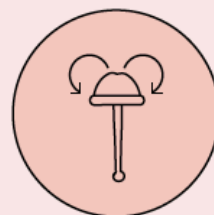


RETOURNEZ LA COUPE

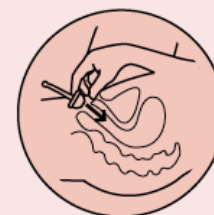

INSÉREZ-LA

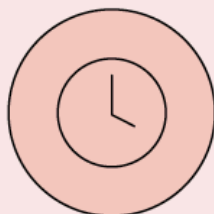

20-60 MIN

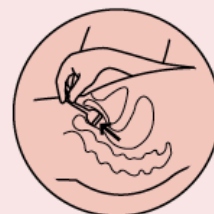

ENLEVEZ-LA



NETTOYEZ-LA



La coupe maintient les spermatozoïdes en place pendant que l'on urine, que l'on prend une douche ou que l'on fait d'autres choses



L'utilisation de la coupe de conception peut entraîner une augmentation de plus de 300% des spermatozoïdes présents dans la glaire cervicale



La coupe peut être lavée et/ou bouillie pour maintenir l'hygiène

# TESTIMONIALS



FERTI-LILY



Essai pendant plus d'un an, enceinte après un cycle de grossesse. Il nous restait un mois avant de passer à un traitement hormonal. Nous voulions donc tout essayer pour que les choses se fassent naturellement. Cela a marché, je suis enceinte. Je pense que le FERTI.LILY a vraiment aidé.



Facile à utiliser, bonne explication et hasard ou non, j'étais enceinte après 1 cycle en utilisant FERTI-LILY.



Je suis très heureuse que cela ait bien marché du premier coup. J'ai fait attention à mon ovulation et utilisé des tests d'ovulation. Les spermatozoïdes de mon mari ne sont pas très mobiles et j'ai eu beaucoup de mal à tomber enceinte, mais, avec FERTI-LILY, ça a marché du premier coup.



Facile à insérer, vous ne la sentirez pas.



Je suis totalement surprise d'être enceinte ce mois-ci. Nous essayons depuis 4 mois et avons déjà utilisé un lubrifiant de fertilité. Nous avons maintenant intégré FERTI-LILY dans notre routine et je suis tombée immédiatement enceinte. Je veux juste dire que le produit ne garantit pas que vous tomberez enceinte, mais c'est certainement une bonne façon d'amener le sperme plus près du col de l'utérus.



Après sept mois d'essai, j'ai essayé la coupe. Après un seul essai, cela a fonctionné. Je suis tombée enceinte tout de suite et cela fait 12 semaines maintenant. Cela aide les spermatozoïdes à aller dans le bon sens, afin que vous puissiez poursuivre les câlins après avoir eu des rapports sexuels.




# OUTILS POS & CONDITIONS:




FERTI·LILY



 MÉDIAS SOCIAUX



 COMMUNICATION DE PRESSE

